

## **Bedienungsanleitung:**

Um den Eisbeutel einzufrieren, legen Sie ihn vor jedem Gebrauch für 6 bis 8 Stunden in den Gefrierschrank. Wenn Sie die Eisbeutel verwenden möchten, um den Medikamentenkoffer kühl zu halten, nehmen Sie die beiden Beutel aus dem Gefrierschrank und legen Sie sie in die Netzbeutel im Innenfutter des Koffers. Wenn die Eisbeutel an ihrem Platz sind, legen Sie das medizinische Gerät oder die Fläschchen an die richtige Stelle, um sicherzustellen, dass sie sicher im Koffer gehalten werden.

### Kühlungsdauer:

Zwei Eisbeutel können die Innentemperatur des Koffers etwa 6 bis 8 Stunden lang bei 2 bis 8 Grad Celsius halten und die Innentemperatur unter normalen Bedingungen etwa 3 bis 4 Tage lang unter 20 Grad Celsius halten. Bei extremer Hitze überwachen Sie bitte die Innentemperatur sorgfältig und tauschen Sie die Eisbeutel bei Bedarf gegen kalte aus.

### Produktlebensdauer:

Jeder Eisbeutel kann 2–3 Jahre lang wiederholt verwendet werden. Wenn der Eisbeutel beschädigt oder sichtbar beschädigt ist, entsorgen Sie ihn bitte und ersetzen Sie ihn.

### Lagerung ungeöffneter medizinischer Fläschchen:

Wenn sie nicht verwendet werden, sollten die medizinischen Fläschchen bei der auf der Verpackung des Arzneimittels angegebenen Temperatur aufbewahrt werden. Dies ist oft bei Kühlschranktemperatur (2–8 Grad Celsius) oder sogar gefroren der Fall, bewahren Sie sie daher entsprechend im Kühlschrank oder Gefrierschrank auf.

Wenn Sie Fläschchen in der isolierten Tasche transportieren, legen Sie den Eisbeutel nicht in direkten Kontakt mit dem Medikament, da er zu kalt sein und das Medikament „schockieren“ kann, wodurch es sich zersetzt. Reisehinweise: Nehmen Sie die isolierte Medikamententasche auf Reisen immer mit und bewahren Sie sie nicht in Ihrem Gepäck auf, damit Sie während der gesamten Reise den Überblick über ihren Verbleib behalten und die Temperatur überwachen können. Gepäck kann über längere Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt sein, was Ihre Medikamente beschädigen kann. Lassen Sie die isolierte Tasche nicht in direktem Sonnenlicht oder auf Heizkörpern liegen, um die Kühlungsdauer zu gewährleisten.